

## METODY MIARECZKOWANIA

### DR CLEANSTERIL CN.6

#### Metodyka miareczkowania:

1. Pobrać 10 ml roztworu roboczego **DR CLEANSTERIL CN.6** przeznaczonego do badania.
2. Dodać 3 krople fenoloftaleiny 1%.
3. Miareczkować roztworem HCL 0,1 Mol/litr, aż do momentu zmiany koloru roztworu.
4. Ilość dodanych ml roztworu HCL (VmlHCL) pomnożyć przez współczynnik  $V=0,827$

$$\mathbf{X\% = 0,827 \times VmlHCL}$$

