

## METODY MIARECZKOWANIA

### DR CLEANSTERIL DDA

#### Metodyka miareczkowania:

1. Pobrać 10 ml roztworu roboczego **DR CLEANSTERIL DDA** przeznaczonego do badania.
2. Dodać 3 krople fenoloftaleiny 1%.
3. Miareczkować roztworem HCL 0,1 Mol/litr, aż do momentu zmiany koloru roztworu.
4. Ilość dodanych ml roztworu HCL ( $V_{mlHCL}$ ) pomnożyć przez współczynnik  $V=0,72$

$$\underline{X\% = 0,72 \times V_{mlHCL}}$$

